

CE



Závěsný obal paže

021



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Závěsný obal paže 021

URČENÝ ÚČEL

Závěsný obal paže 021 je určen k zavěšení a odlehčení horní končetiny v postavení s flexí lokte při poúrazových a pooperačních stavech v oblasti ramenního kloubu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Umístěním předloktí do kapsy, zavěšené na popruhu přes rameno, dochází k odlehčení a fixaci horní končetiny.

INDIKACE

Poúrazové a pooperační stavy vyžadující odlehčení a fixaci v oblasti předloktí a loktu

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

verze plátno: 100% bavlna
verze sendvič: Polyuretan (PUR) 60%,
polyamid (PAD) 20%, bavlna 15%,
polyester(PES) 5%

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Datum poslední revize: 1.2. 2020

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

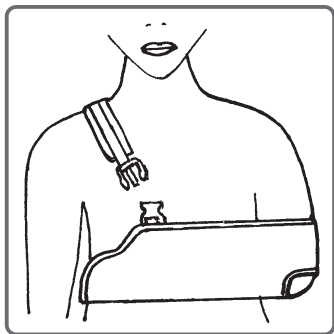

1

Rozeptejte sponku.
Vložte ruku do závěsu
a přehodte popruh šikmo
přes záda.

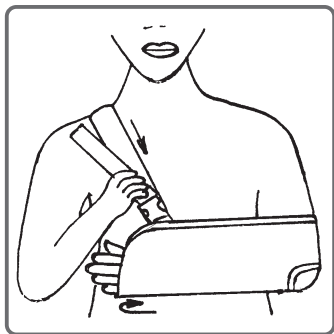

2

Zapněte sponku a dotáhněte
popruh dle potřeby tak, aby
loket svíral úhel zhruba 90°.
Zahrňte přední díl látky
dle potřeby (ortéza by měla
končit v půlce dlaně)

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK