

CE



Prstová ortéza
030



HANDICAP

Prstová ortéza 030

URČENÝ ÚČEL

Prstová ortéza 030 je určena k fixaci prstů (2.-4. prst) ruky při pooperačních a poúrazových stavech v oblasti 2.-4. prstu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Slouží k fixaci 2.-4. prstu ruky pomocí dlahy, kterou lze vytvarovat dle potřeby pacienta a stáhnout pomocí suchého žípu.

INDIKACE

- Poranění 2.-4. prstu ruky.
- Doléčení po operaci v oblasti prstů ruky.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, polyamid (PAD) 20%, bavlna 15%, polyester (PES) 5%.

ČÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

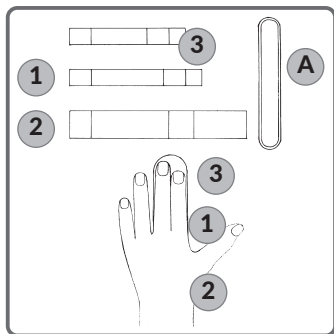

1

Sundejte všechny pásky a přiložte dlahu pod postižený prst – duralová dlahu může být tvarována dle potřeby odborným personálem.

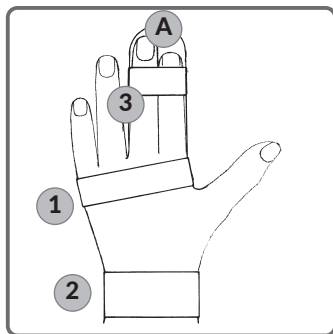

2

Postupně připínejte pásky (na stranu s počesaným materiálem) v pořadí dle obrázku 2 na díl A. Po nasazení zkontrolujte správnou pozici a dotažení pásku.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.


Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*

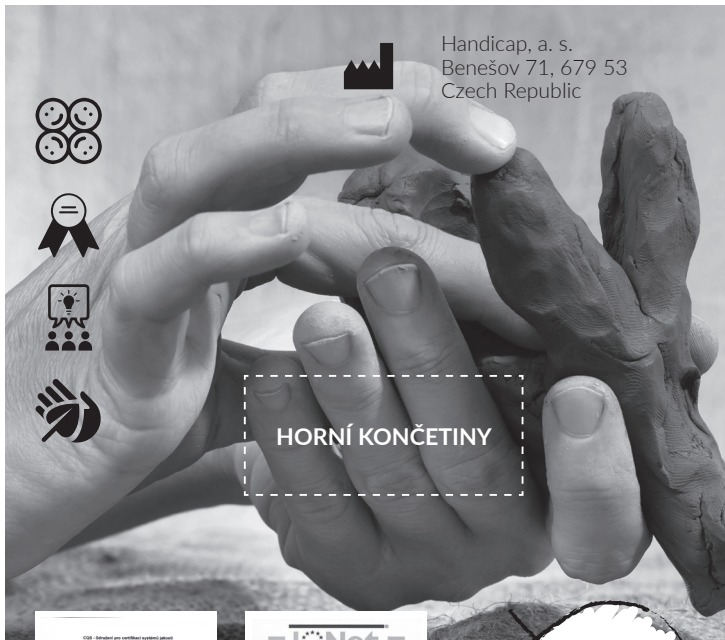

Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK