

CE



Krční límec  
**032A**



**HANDICAP**

## Krční límec 032A

### URČENÝ ÚČEL

Krční límec 032A je určen k fixaci krční a šíjové oblasti při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti krku a šíje.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udrží mírnou až semirigidní fixaci v oblasti krku a šíje.

### INDIKACE

- Lehké distorze krční páteře.
- Doléčení po těžkých distorzích, operacích a frakturách po sejmutí rigidnější fixace.
- Bolestivé stavy (např. degenerativní stavy).

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polyuretanová (PUR) pěna 80% + bavlněný úplet 20%.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

Datum poslední revize: 1.2. 2020

# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



**1**

Obtočte límeček kolem krku dle anatomického tvarování.



**2**

Zapněte suchý zip.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic



ČESKÝ VÝROBEK