

CE

Rigidní
fixace
hlezna

065C

Nechodící



HANDICAP

Rigidní fixace hlezna 065C nechodící

URČENÝ ÚČEL

Rigidní fixace hlezna 065C je určena k fixaci hlezenního kloubu při pooperačních a poúrazových stavech v oblastí hlezna.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Fixuje hlezno v neutrální poloze za pomoci tří dlah po stažení suchým zipem.

INDIKACE

Poúrazové a pooperační stavy vyžadující fixaci v neutrální poloze.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, polyamid (PAD) 20%, bavlna 15%, polyester (PES) 5%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

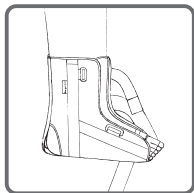


1

Rozeptejte botu
a vsuňte postiženou končetinu.



2

Srovnejte jazyk, aby nikde netlačil.
Zapněte pásky ve správném pořadí
dle obrázku č. 3.

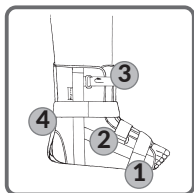

3

Dotáhněte střední kotníkový pásek.
Pásek musí být zapnutý pevně,
ale nesmí příliš tlačít na kotník.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK