

CE



Kolenní ortéza
101A



HANDICAP

Kolenní ortéza 101A

URČENÝ ÚČEL

Kolenní ortéza 101A je určena k prohráti a velmi mírné stabilizaci oblasti kolene při lehkých poúrazových stavech a mírných degenerativních změnách kolenního kloubu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mírnou stabilizací v kolenním kloubu bez omezení rozsahu pohybu ve všech směrech. Zahřívá - termoterapie.

INDIKACE

- Mírná měkkotkáňová poranění kolenního kloubu.
- Doléčení stavů po distorzích a kontuzích kolene.
- Při lehkých degenerativních změnách
- Svalová poranění v oblasti kolenního kloubu, distálního hlezna a proximálního bérce.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

4 mm chloropren (neopren) (90%) + polyamid (PAD) 10%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

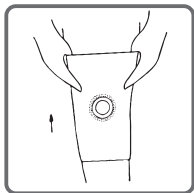

1

Chytněte ortézu za vrchní konec (palci uvnitř).

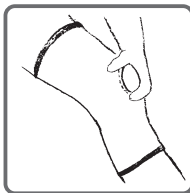

2

Natáhněte tak, aby se patela (čěška) nacházela ve středu otvoru.



3

Pro sundání uchopte spodní konec ortézy a táhněte ortézu dolů.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK