

Návod k použití

Sádrové obinadlo

Sádrové obinadlo je určeno k sádrování cirkulární technikou. Slouží k rychlé immobilizaci všech typů zlomenin, k léčbě onemocnění kloubů a kostí a k modelaci sádrových dlah.

Charakteristika

Sádrové obinadlo je složeno z bavlněné gázy bez fluorescence, impregnované sádrou s obsahem 88% síranu vápenatého. Obinadlo je výborně zpracovatelné.

Způsob použití





- Očistíme a osušíme obvazovanou část těla.
- Přiložíme podkladový materiál (pletený hadicový obvaz). Obvazovaná část je již ve správném postavení. Podkladová vrstva je na každém konci vždy delší, než bude délka sádrového obvazu.
- Sádrové obinadlo vyjmeme z originálního obalu, ponoříme do vody cca 20°C teplé na 1-3 sekundy, poté z obinadla vymačkáme přebytečnou vodu.
- Postupně obinadlo rozvíjíme a přikládáme na požadovanou část těla. Otáčky se překrývají polovinou šířky obinadla. Okraje sádrového obinadla překryjeme přečnívající částí podkladového obvazu a uhladíme, aby nikde nedráždily a nezraňovaly kůži.
- Následně ihned modelujeme obinadlo do požadovaného tvaru. Doba určená pro modelaci je maximálně 2 minuty.
- Poté necháme 4-7 minut ztuhnout. Mechanická odolnost obvazu je po 30 minutách 110 kg/m².

Skladování

Skladujte v suchu a chladnu při teplotě nepřevyšující 25°C. Optimální teplota pro skladování je 10°C až 24°C. Doba skladování je 2 roky od data výroby. Datum expirace je uvedeno na obalu.

Likvidace

Výrobek i jeho obal je možné likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu.

Zdravotnický prostředek **MD**
je určený pro jednoho pacienta
a nesmí být použit opakovaně 

Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením 



JOIN ENTERPRISE CO., LTD.Korea

Distributor:

Handicap trade s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno
CZECH REPUBLIC

Datum poslední revize: 01.01.2022