



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Hůl duralová
H 81

Název výrobku

Hůl duralová H 81

Popis a určený účel

Hůl duralová H 81 je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem. Hůl se vyrábí s rovnou nebo zahnutou rukojetí.

Upozornění pro pacienta

- Hůl používejte pouze pro určený účel.
- Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.
- Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do **100 kg!**
- Přibližně po 1 měsíci užívání proveďte kontrolu hole, při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je nutno ho vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.
- K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.




Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Rozměry a hmotnost

Délka hole :	vel.1: 850 mm ± 10 mm
	vel.2: 900 mm ± 10 mm
	vel.3: 950 mm ± 10 mm
	vel.4: 1 000 mm ± 10 mm
Hmotnost:	320 g ± 5 %

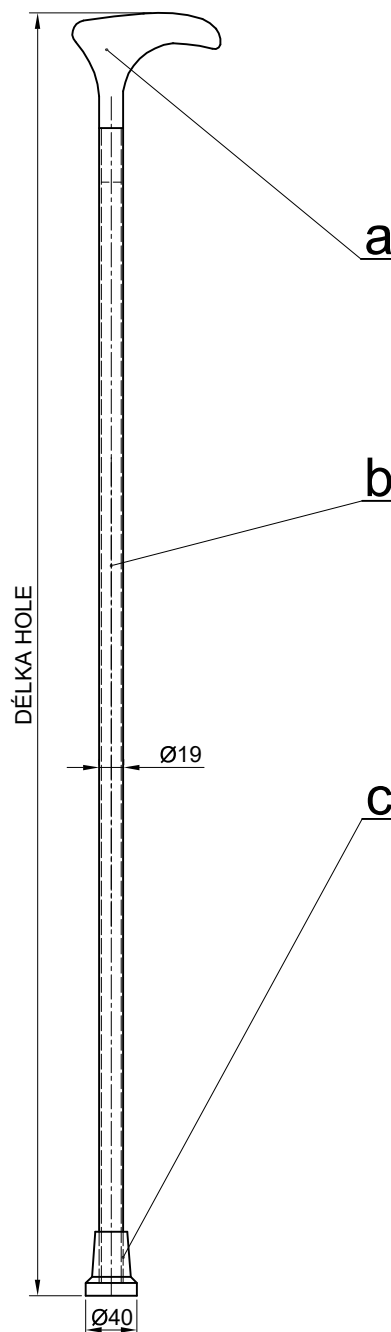

- a. rukojeť
- b. nosník
- c. násadec



Upravení délky hole

Drobnější úpravy délky hole lze provést uříznutím trubky.

1. Sundejte násadec hole.
2. Vhodným nástrojem zkraťte délku trubky v koncové části na požadovanou délku.
3. Případné otřepy odstraňte pilníkem.
4. Nasadte zpět násadec.

Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením .



Handicap trade s.r.o.

Bystrcká 612/15

624 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

www.berle.cz



Datum poslední revize: 01.06.2022