



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Hůl skládací
HS 01

Název výrobku

Hůl skládací duralová HS 01

Popis a určený účel

Skládací hůl HS 01 je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť.

Hůl lze složit a zajistit páskem pro snadnou přepravu či uskladnění.

Upozornění pro pacienta

- Hůl používejte pouze pro určený účel.
- Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.
- Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do **100 kg!**
- Přibližně po 1 měsíci užívání proveďte kontrolu hole, při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je nutno ho vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.
- K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



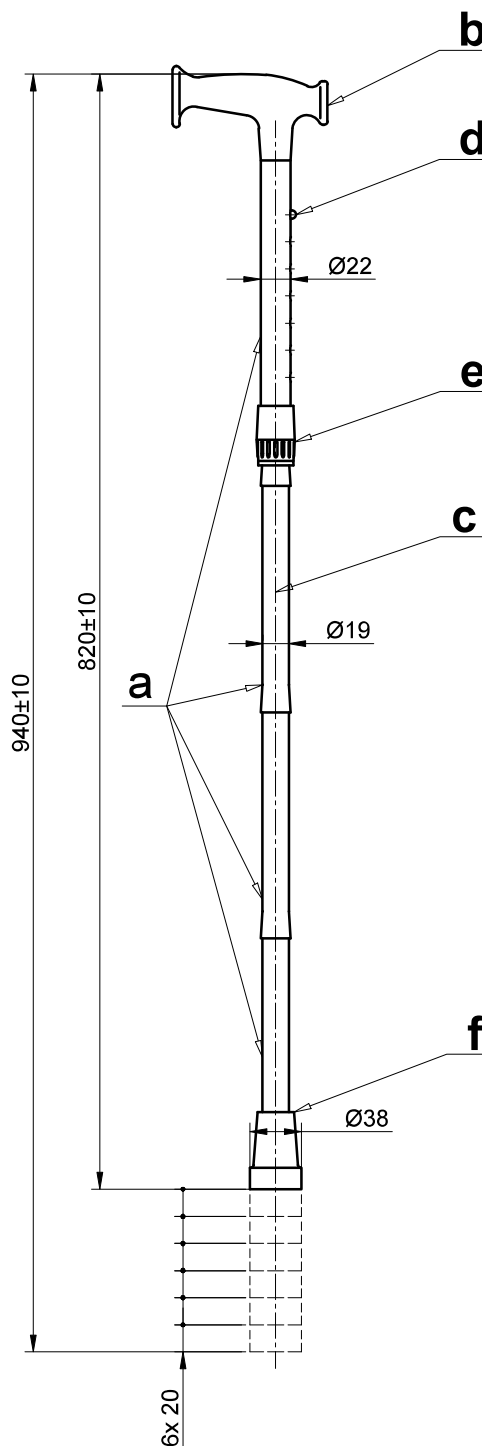
Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

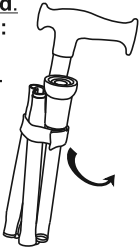
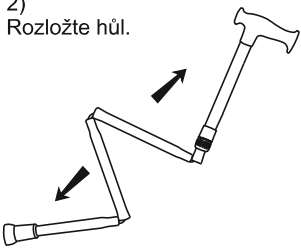

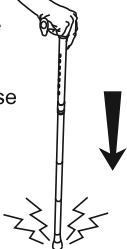
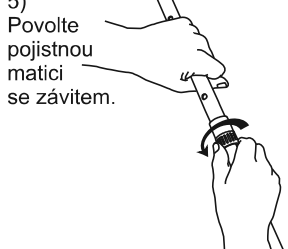
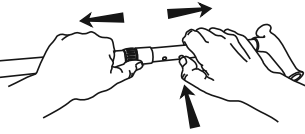
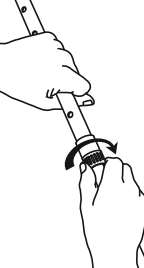
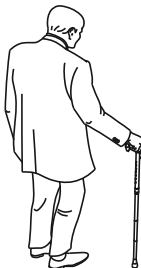
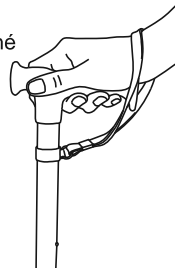

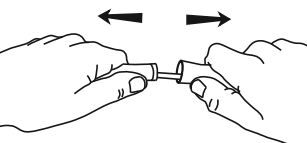
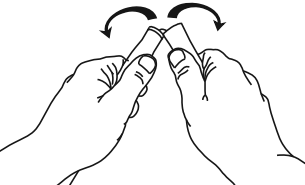
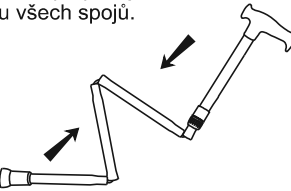
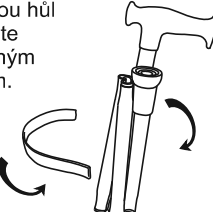
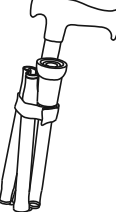
Rozměry a hmotnost



Délka rozložené hole min.:	820 mm ± 10 mm
Délka rozložené hole max.:	940 mm ± 10 mm
Délka složené hole:	300 mm ± 10 mm
Hmotnost:	380 g ± 5 %

- a. nosník
- b. rukojeť
- c. pružné lanko
- d. aretovací pružina s kolíkem
- e. závitová matice
- f. násadec



Montážní návod

<p>Montážní návod. Rozložení hole: 1) Rozpojte pásek.</p> 	<p>2) Rozložte hůl.</p> 	<p>3) Zasuňte do sebe jednotlivé díly.</p> 
<p>4) Po složení udeřte hůl několikrát kolmo o zem. Jednotlivé spoje se tím dotáhnou.</p> 	<p>5) Povolte pojistnou matici se závitem.</p> 	<p>6) Zatlačte palcem pojistný čep a nastavte požadovanou délku hole dle roztečí otvorů.</p> 
<p>7) Pojistnou matici opět utáhněte.</p> 	<p>8) Hůl je připravena k použití.</p> 	<p>9) Pro bezpečné připoutání hole k ruce lze přikoupit pouzko k holi.</p> 
<p>Montážní návod. Složení hole: 1) Udeřte hůl šikmo 3x o zem. Jednotlivé spoje se uvolní.</p> 	<p>2) Roztáhněte jednotlivé díly od sebe.</p> 	<p>3) Ve spojích hůl složte.</p> 
<p>4) Postup opakujte u všech spojů.</p> 	<p>5) Složenou hůl spoutejte přiloženým páskem.</p> 	<p>6) Složená hůl.</p> 

Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením .



Handicap trade s.r.o.

Bystrcká 612/15

624 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

www.berle.cz

Datum poslední revize: 01.06.2022