

HAN 05A

Polohovací kolébka - omyvatelná

Rozměry: 48 x 36 x 10 cm
Výplň: PPUR120
Obal: PES úplet s nánosem PUR



Polohovací kolébka je určena k otáčení a polohování pacientů, čímž usnadňuje ošetřovatelům hygienickou péči o pacienta. Umožňuje snadno změnit polohu na lůžku a předcházet vzniku proleženin.

Povlak kolébky je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Dlouhodobě doporučujeme výrobek nepoužívat v přímém kontaktu s kůží. Materiál má z lícové strany přirozenou protiplísňovou a antibakteriální úpravu, je neprodyšný a nepromokavý.

Pokyny k údržbě: Povlak klínu lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmut a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%


LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Návod k použití:


- I. Nadzvedněte pacientovi dolní končetiny **1** a vložte polohovací kolébku do podkolenní oblasti **2**.

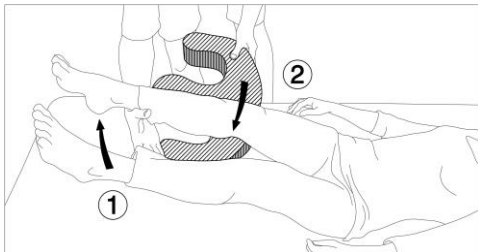

- II. Obráťte kolébku tak, aby končetiny zůstaly ve výřezech **3**.

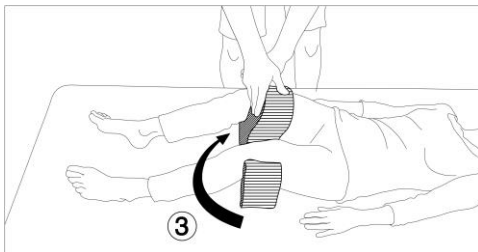

- III. Uchopte kolébku jednou rukou za poutko a druhou rukou přidržujte pacienta za bok. Pomocí poutka otočte pacienta do požadované polohy **4**.

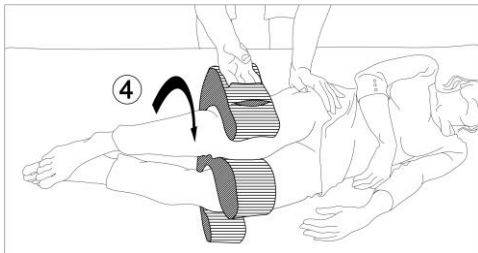

- IV. Stejným způsobem postupujte při polohování do výchozí polohy **5**.

