



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Násadec č. 3
na berle a hole

Násadec č.3 na berle a hole

Popis a účel výrobku

Násadec je náhradní díl určený pro lokomoční pomůcky jako jsou berle a hole. Lze použít pro následující lokomoční pomůcky firmy Handicap trade : francouzské berle FD 93, VERA, FDD 91, ELLA a hole H 81, HS 95, LYRA a HS 01. Násadec lze použít i pro lokomoční pomůcky jiných výrobců mají-li nosník o průměru 17,75 – 19,5 mm. Násadec je vyroben z odolného termoplastického elastomeru a je opatřen kovovou vložkou zabraňující proražení čelní plochy trubkou nosníku berle nebo hole.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení násadce způsobené jeho obvyklým užíváním.

Rozměry a hmotnost

Základní rozměry viz obrázek.

Hmotnost násadce: 40 g ± 5 %

Výměna násadce

Poškozený nebo opotřebovaný násadec sejměte tahem za mírného pootáčení.

Zkontrolujte stav konce nosníku a v případě, že již došlo k jeho poškození zarovnejte dosedací plochu a odstraňte případný otřep pilníkem.

Nasadte nový násadec na nosník berle nebo hole a tlakem proti tvrdé podložce zatlačte nosník až na dno násadce.

