

Návod k použití

Dlahy OPTIMA SPLINT


Dlahy OPTIMA SPLINT je určena k rychlému ošetření zlomenin, distorzí, poranění vazů a k imobilizaci kloubů. Dlahy jsou vyrobeny ze dvou vrstev. Vnitřní vrstvu tvoří několik pásků ze skelných vláken napuštěných polyuretanovou pryskyřicí, které se vyznačují vysokou tuhostí. Kontaktní vrstva je vyrobena z měkkého netkaného antibakteriálního materiálu, který udržuje optimální vlhkost pokožky a poskytuje maximální pohodlí pro pacienta. Dlahy se vyznačují vysokou variabilitou použití a nízkou dobou tuhnutí. Jsou určeny k aplikacím na traumatologických, chirurgických a ortopedických pracovištích.

Charakteristika

- antibakteriální a zápach snižující efekt
- vysoká variabilita použití · jednoduché a rychlé použití
- nízká hmotnost dlahy
- vysoce kvalitní materiál

Způsob použití

1. Z balení odvineme požadovanou délku dlahy a vyjmeme ji z obalu.
2. Mezi kontaktní a vnitřní vrstvu nalijeme malé množství vlažné vody.
3. Dlahu uchopíme za oba konce a několikrát s ní otočíme ze strany na stranu aby se voda rovnoměrně rozmístila a aktivovala se skelná vlákna.
4. Uvolněte jeden konec dlahy a nechte vytéct přebytečnou vodu ven.
5. Dlahu aplikujeme na požadované místo, vytvarujeme a ovážeme obinadlem. Doba tuhnutí se

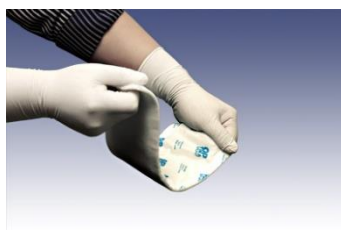

Rozměry (šířka x délka)

- 5,0 cm x 4,5 m
- 7,5 cm x 4,5 m
- 10,0 cm x 4,5 m
- 12,5 cm x 4,5 m
- 15,0 cm x 4,5 m

Skladování

Po každém použití balení vždy pečlivě uzavřete v koncové části přiloženým skřipcem, aby nedocházelo k samovolnému tvrdnutí dlahy. Při správném uzavření obalu nedochází k tvrdnutí dlahy po dobu minimálně 60 dní. Skladujte v suchu a chladnu při teplotě nepřevyšující 25°C. Optimální teplota pro skladování je 10°C až 24°C. Doba skladování je 2 roky od data výroby. Datum expirace je uvedeno na obalu.

Likvidace

Výrobek i jeho obal je možné likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu.

Zdravotnický prostředek **MD**

je určený pro jednoho pacienta

a nesmí být použit opakovaně



Skladujte na suchém místě chráněném před slunečním zářením



JOIN ENTERPRISE CO., LTD.Korea

Distributor:

Handicap trade s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno

CZECH REPUBLIC

Datum poslední revize: 01.01.2022