



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Berle francouzská
dětská měkčená
ELLA

Berle francouzská dětská měkčená ELLA Handicap

Určený účel

Berle francouzská dětská měkčená ELLA Handicap je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability při nemožnosti užití standardní bipedální lokomoce u dětských pacientů či pacientů menšího věku.

Vlastnosti z hlediska účinnosti

Odlehčuje dolní končetinu a zajišťuje stabilitu při různých poúrazových, pooperačních nebo degenerativních stavech.

Indikace

- Nutnost trvalého či dočasného odlehčení váhy nesené dolními končetinami při různých poúrazových, pooperačních či degenerativních stavech s přítomnou dostatečnou silou a koordinací horní části těla k opoře a pohybu vlastní tělesné hmotnosti.
- Doléčení stavů po distorzích, kontuzích v oblasti dolní končetiny.

Kontraindikace

- Těžké degenerativní či potraumatické změny v oblasti horní končetiny přebírající nosnou funkci za dolní končetiny (zejména pak ramenního či zápěstního kloubu) vylučující použití berlí.
- Nedostatečná síla či koordinace horní části těla umožňující pohyb či oporu váhy vlastního těla.

Zbytkové riziko

Není známo.

Cílová skupina

Pacienti s výše uvedenou indikací poučení odborníky z daného klinického oboru.

Upozornění pro pacienta

- Berli používejte pouze pro určený účel.
- Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (tj. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážně zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, tj. v úhlu přesahujícím 30° od svislé polohy.
- Berle je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do **100 kg!**
- Přibližně po 1 měsíci užívání proveďte kontrolu berle, při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je nutno ho vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání.
- K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha.
- Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení berle způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

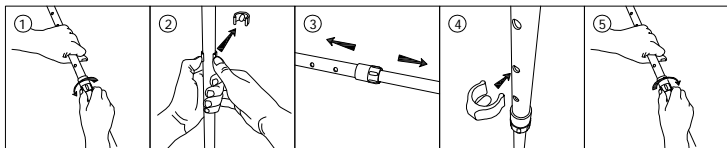
Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.




Rozměry a hmotnost

Délka berle min.:	760 ± 10 mm
Délka berle max.:	985 ± 10 mm
Vzdálenost rukojeť - lok. opěrka:	186 ± 2 mm
Vzdálenost rukojeť - země min.:	570 ± 10 mm
Vzdálenost rukojeť - země max.:	795 ± 10 mm
Hmotnost:	440 g ± 5 %

Nastavení délky berle

1. Uvolní se pojistná matice otáčením proti směru hodinových ručiček (1).
2. Vyjme se třmen s kolíkem (2).
3. Dolní nástavec se vysune na přibližně potřebnou výšku (3), přesná výška se nastaví vybráním jednoho ze dvou otvorů v dolním nástavci.
4. Zpřesní se poloha otvorů nosníku dolního nástavce a zasune se třmen s kolíkem (4).
5. Proveďte se pojištění nastavené délky dotažením pojistné matice otáčením ve směru hodinových ručiček (5).



Zdravotnický prostředek **MD**
je určený pro jednoho pacienta 
Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením 

 **Handicap trade s.r.o.**
Bystrcká 612/15
624 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
www.berle.cz

Datum poslední revize: 01.2.2022

