

Sádrové obinadlo

1. Použití výrobku

Sádrové obinadlo je určeno k sádrování cirkulární technikou. Slouží k rychlé immobilizaci všech typů zlomenin, k léčbě onemocnění kloubů a kostí a k modelaci sádrových dlah.

2. Popis výrobku

Sádrové obinadlo je složeno z bavlněné gázy bez fluorescence, impregnované sádrou s obsahem 88% síranu vápenatého. Obinadlo je výborně zpracovatelné.

3. Návod k použití

- Očistíme a osušíme obvazovanou část těla.
- Přiložíme podkladový materiál (pletený hadicový obvaz). Obvazovaná část je již ve správném postavení. Podkladová vrstva je na každém konci vždy delší, než bude délka sádrového obvazu.
- Sádrové obinadlo vyjmeme z originálního obalu, ponoříme do vody cca 20°C teplé na 1-3 sekundy, poté z obinadla vymačkáme přebytečnou vodu.
- Postupně obinadlo rozvíjíme a přikládáme na požadovanou část těla. Otáčky se překrývají polovinou šířky obinadla. Okraje sádrového obinadla překryjeme přečnávající částí podkladového obvazu a uhladíme, aby nikde nedráždily a nezraňovaly kůži.
- Následně ihned modelujeme obinadlo do požadovaného tvaru. Doba určená pro modelaci je maximálně 2 minuty.
- Poté necháme 4-7 minut ztuhnout. Mechanická odolnost obvazu je po 30 minutách 110 kg/m².

4. Hmotnost

Hmotnost: cca 450 g/m²

5. Rozměry

šířka x délka	6,0 cm x 2 m	20 ks / balení
	10,0 cm x 3 m	20 ks / balení
	15,0 cm x 3 m	20 ks / balení
	20,0 cm x 3 m	30 ks / balení

6. Údržba

Skladujte v suchu a při teplotě od 5°C do 30°C.

6. Ekologické informace

Použitý obal nebo poškozený či nefunkční výrobek je možno odložit do sběru domovního odpadu.



Distributor:

ERILENS s.r.o.

Papirenská 114/5, 160 00 Praha 6, CZ

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

